

## 24 SAATLİK İDRAR KORUYUCU EKLEME FORMU

Testler	Oda Isısı	4°C	-20°C	6M HCl	%50 AA	Borik Asit	Transport	Koruyucu Ekeme Zamanı
				10 mL/24sa	10 mL/24sa	5 g/24sa		
17-Ketosteroidler	H	E	H	H	G	H	4°C	Sonra
3-Metoksitiramin	H	E	E	E	E	H	4°C	Sonra
5-Hidroksiindol asetik asit	H	E	E	pH 2-5	T	E	4°C	Önce
Ağır Metaller	H	E	E	T	H	T	4°C	Sonra
Albumin	H	E	E	E	H	H	4°C	Sonra
Aldosteron	E	E	E	H	T	E	4°C	Önce
Alfa-1 Mikroglobulin	H	E	E	H	E	E	4°C	Sonra
Aluminyum	H	E	E	E	E	H	4°C	Sonra
Amino Asitler	H	E	T	H	H	H	4°C	Sonra
Aminolevulinik Asit	H	E	H	E	T	H	Oda ısısı	Sonra
Ariksülfataz A	E	T	E	E	H	E	4°C	Sonra
Arsenik	E	T	E	E	E	H	4°C	Sonra
Bakır	E	T	E	E	E	E	4°C	Sonra
Civa	E	T	E	E	E	H	4°C	Sonra
Çinko	E	E	E	E	E	H	4°C	Sonra
Fosfor	E	T	E	E	E	E	4°C	Sonra
Hafif Zincir, Total	E	T	H	H	E	E	4°C	Sonra
Homovanillik Asit*	H	H	H	pH 2-4	T	H	4°C	Önce
İyot	E	T	H	E	H	H	4°C	Sonra
Kadmiyum	E	T	E	E	E	H	4°C	Sonra
Kalsiyum	E	T	T	E	E	E	4°C	Sonra
Katekolaminler*	H	E	H	T	G	H	4°C	Önce
Klor	E	T	E	E	H	E	4°C	Sonra
Kollajen NTX-Telopeptid	H	T	E	H	H	E	4°C	Sonra
Kortizol, Serbest	E	E	E	E	E	T	4°C	Önce
Kreatinin	E	E	E	E	E	T	4°C	Sonra
Kreatinin Klirensi	E	E	E	E	E	T	4°C	Sonra
Kobalt	E	T	E	H	E	E	4°C	Sonra
Krom	E	T	E	H	E	E	4°C	Sonra
Kurşun	E	T	E	E	E	H	4°C	Sonra
N-Metilhistamin	E	T	E	E	E	E	4°C	Sonra
Mangan	E	T	E	H	E	E	4°C	Sonra
Magnezyum	E	T	E	E	E	E	4°C	Sonra
Metanefrinler*	H	H	H	E	E	H	4°C	Önce
Mikroalbumin	T	E	E	H	H	E	4°C	Sonra
Molibden	E	T	E	E	E	E	4°C	Sonra
Monoklonal Protein	E	T	E	H	E	E	4°C	Sonra
Nikel	E	E	H	E	H	H	4°C	Sonra
Oksalat	E	Ş	E	T	H	H	4°C	Önce
pH	E	E	H	H	E	E	4°C	Önce
Porfirinler / porfobilinojen	H	E	H	H	H	H	4°C	Sonra
Potasyum	E	E	H	E	E	E	4°C	Sonra
Pridinolin / Deoksipridinolin	H	H	E	T	E	E	-20°C	Sonra
Protein, Total	E	E	E	H	E	H	4°C	Sonra
Sistin	H	E	E	H	H	H	4°C	Önce
Sitrat	H	E	E	E	E	T	4°C	Önce
Serotonin	E	E	E	T	E	E	4°C	Önce
Sodyum	E	E	H	E	E	E	4°C	Sonra
Üre	E	E	H	E	E	T	4°C	Sonra
Ürik Asit	H	E	E	E	E	T	4°C	Sonra
Talyum	E	E	H	E	H	H	4°C	Sonra
Vanilmandelik Asit (VMA)*	H	E	H	pH 2-4	T	H	4°C	Önce